

# 椎体系 Navigation マニュアル

オーダーコメントより、Navigation 画像の出力依頼があった場合、プロトコル：【椎体 Navigation】で撮影  
→軟部 1 mm データが ZIO に自動転送するよう設定されている  
※椎体は FOV 180 以下で撮影

撮影後、ZIO にて軟部 1mm データを CD 出力

新たに再構成する場合は？

FOV 180 以下

軟部 1mm データ

再構成して ZIO


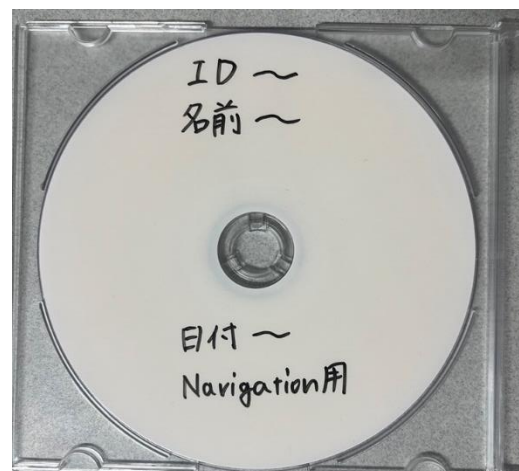



図1 CD 作成時の表紙

CD 出力前に確認して！

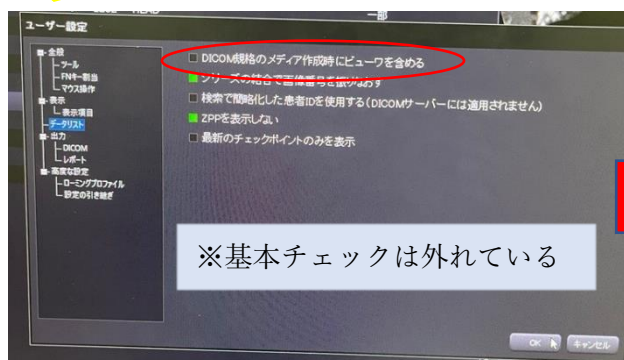

確認後

【エクスポート】→【DICOM 規格でメディア作成】で出力

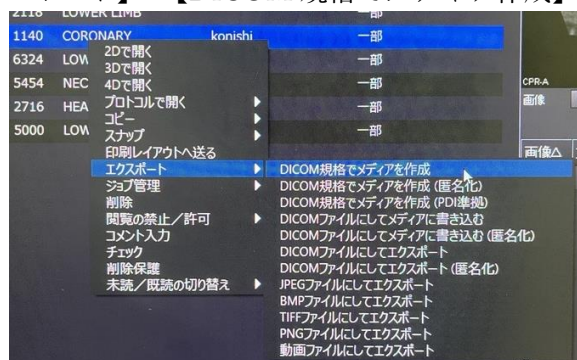

【DICOM 規格のメディア作成時にビューアを含める】にチェックが外れている事を確認！

ZIO モニタ右下の ZIO マーク→【ユーザー設定】→【データリスト】から確認できる